

thermaprep 2

Новая печь для obtураторов

Вам высказывали недовольство по поводу предыдущей модели печи?

- Нет возможности нагревать 2 obturator одновременно
- Пружина рычага срабатывает слишком быстро
- Obturator держится неплотно и плохо центрирован
- Тяжело чистить
- Печь нуждается в новом дизайне



Новая печь решает все эти проблемы

У новой печи есть:

- ✓ Одновременный нагрев двух obturators
- ✓ Пружина рычага срабатывает медленней и точнее
- ✓ Obturator держится крепко
- ✓ Режим очистки для простого ухода
- ✓ Новый дизайн

thermaprep 2

Новый дизайн



DENTSPLY
MAILLEFER

Характеристики

Трехмерный нагрев

Нагрев в камере осуществляется точно до того момента, когда obturator готов к использованию, это идеально подходит при obturации нескольких каналов.

Плавное внесение и извлечение obturаторов

Держатели obturаторов обеспечивают четкое вертикальное вхождение и извлечение из нагревательной камеры.

Световой индикатор и звуковые сигналы


Оповещение о смене статуса происходит при помощи светового индикатора и звуковых сигналов.

Подготовка obturатора занимает менее минуты

Печь разогревает obturаторы за 20-49 секунд в зависимости от размера obturатора

Режим очистки

В режиме очистки температура нагрева повышается и гуттаперча внутри печки размягчается для более простого удаления.

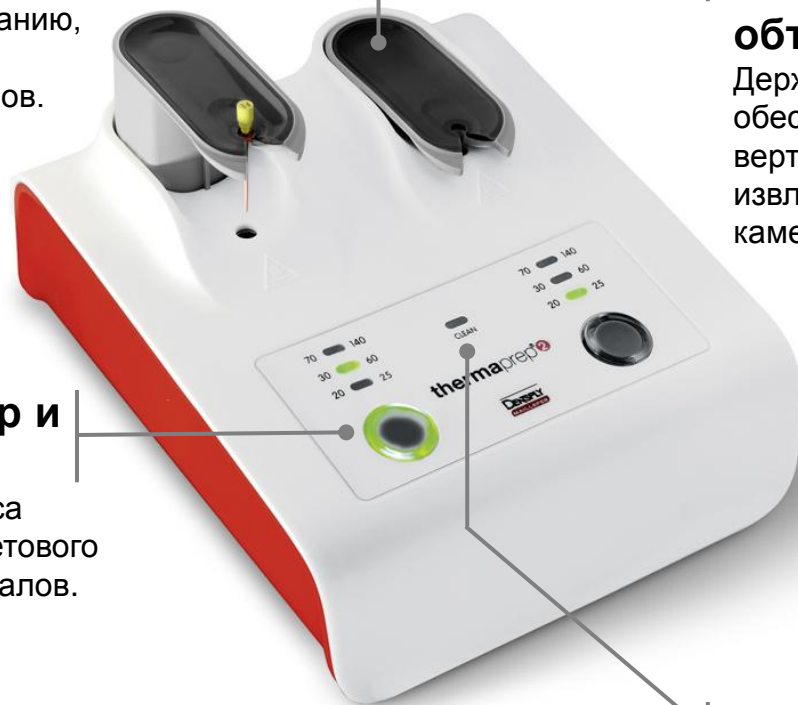

Свойства и преимущества

Свойства	Преимущества
Трехмерный нагрев	Для превосходного заполнения латеральных и апикальных длинных и искривленных каналов (теплая гуттаперча доходит до апекса)
Закрепление obturators	Предотвращает касание obturatorом стенки нагревательной камеры при извлечении
Режим очистки	Режим очистки позволяет содержать печь в чистоте, без остатков гуттаперчи
Новая система держателей obturators	Держатели obturators обеспечивают плавное и точное внесение и извлечение obturators из нагревательной камеры
Быстрый нагрев— менее минуты	Позволяет экономить время во время процедуры. К тому же нагрев поддерживается, пока obturator не будет готов к использованию

Что не изменилось

У новой печи осталось прежним:

- ✓ **Позиционирование**
- ✓ **Размер упаковки**
- ✓ **Совместимость с существующими obturators**

Печь и три набора



Печь Thermaprep2 **Oven**

Состав:

- Печь Thermaprep2 Oven



Набор Thermaprep2 и **Thermafil**

Состав:

- Печь Thermaprep2 Oven
- Thermafil Verifiers Assortment 20-45 (A0175)
- Thermafil Obturators Posterior Kit x20 (A0137)



Набор Thermaprep2 и **ProTaper Universal**

Состав:

- Печь Thermaprep2 Oven
- Обтураторы ProTaper Universal F1 x6 (A1411)
- Обтураторы ProTaper Universal F2 x20 (A1411)
- Обтураторы ProTaper Universal F3 x6 (A1411)



Печь Thermaprep2 и **WaveOne**

Состав:

- Печь Thermaprep2 Oven
- Обтураторы WaveOne Small x6 (A1400)
- Обтураторы WaveOne Primary x20 (A1400)
- Обтураторы WaveOne Large x6 (A1400)



Как ее использовать

Шаг за шагом

Пошаговая инструкция по применению
(Д=действия, Р=результат)

Д : Включите печь воткнув ее в розетку (нет кнопки on/off)

Р : Зажжется подсветка двух кнопок только на ½ секунды (это показывает, что печь включена)

Д : Нажмите на один из держателей обтуратора и отодвиньте его назад

Р : Держатель переместится вверх и будет готов для размещения обтуратора

Д : Размещение обтуратора – для внесения обтуратора слегка надавите на него

Р : Обтуратор будет закреплен в держателе (убедитесь, что силиконовый стоппер находится под держателем)

Д : Нажмите кнопку напротив держателя (удерживайте 1 секунду)

Р : Нужно указать размер обтуратора (20-25, 30-60 или 70-140)

Д : Задвиньте вниз держатель обтуратора

Р : Процесс нагрева автоматически запустится – будет гореть подсветка (около 20-49 секунд, в зависимости от выбранной программы)

Размер обтуратора 20-25 20 секунд

Размер обтуратора 30-60 44 секунд

Размер обтуратора 70-140 49 секунд

А : После первого звукового сигнала обтуратор готов к использованию (подсветка мигает)

Р : Обтуратор будет сохранять нужную температуру 91 секунду, затем напоминающий звуковой сигнал будет звучать каждые 15 секунд

Резервный режим включится через 5 минут

thermaprep 2

печатная информация доступна на 9 языках

Наклейки для thermaprep®2




GT® Series X

наклейка для obturators GT®



ProTaper® Universal

наклейка для obturators ProTaper®

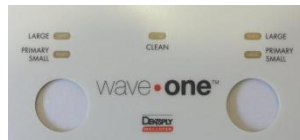

WaveOne™

наклейка для obturators WaveOne™



thermaprep 2

Сравнение с конкурентами

Спецификация продукта	Комментарии		
Производитель		Dentsply	Sybron Endo
Название продукта		thermaprep 2	SoftCore
Держатели обтураторов		ДА	НЕТ
Режим очистки		ДА	НЕТ
Новый дизайн		ДА	НЕТ
Портативность		ДА	ДА
Дисплей		ДА	ДА