




EAC



МОДУЛЬ ВЫТЯЖНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ серия ВМУ

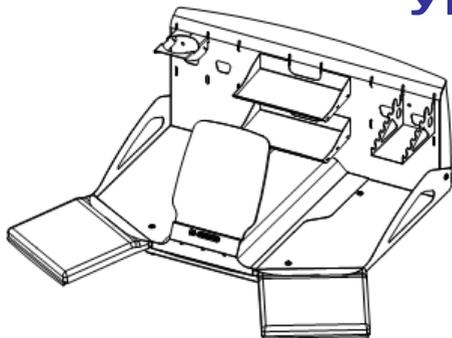

**Этикетка
АВЕ 627.000.000 ЭТ**

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.ХЩ01.В.02138/20 от 29.06.2020

Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3

ООО «ВЕГА-ПРО»

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

www.averon.ru

feedback@averon.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

| ВМУ | 1.0 ТЕЙБЛ ПЛЮС |
|-----------------------------|-----------------------|
| Заводской номер | |
| Контролер ООО «ВЕГА-ПРО» | _____ |
| Дата выпуска _____ | Упаковщик _____ |
| Дата продажи _____ | Продавец _____ |

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Модуля вытяжного универсального серия ВМУ. ТУ 4863-047-52331864-2015.

1.2 ВМУ предназначен для локализации и удаления сухих мелко/среднедисперсных отходов при механической обработке моделей, протезов бормашиной, работе с керамикой и моделировании. Эксплуатируется совместно с внешней вытяжкой (рекомендуется Устройство пылевсасывающее зуботехническое УПЗ-Бокс-01 «Аверон», далее – УПЗ, УПЗ 5.0 АРТ, УПЗ 7.2 КОМФОРТ).

1.3 Особенности

Вытяжная система для организации рабочего места зубного техника на любом столе.

Проемы для рук в боковых стенках – для удобства переноса комплексного рабочего места, собранного на базе ВМУ 1.0 ТЕЙБЛ ПЛЮС, на другие столы. Поддон с вытяжным каналом и защитным экраном ЩИТ 1.0 АРТ, мягкие подлокотники.

Развитая система хранения: многофункциональная задняя стенка для навешивания различных подставок, держателей, лотков, полочек.

Предподготовка для установки бормашины БМ ЭКО ОПТИМУМ/ПРОФИ, подключения сопла обдувочного СО 2.1 СТАРТ и светодиодного светильника ЛЮКС 2.1, поставка по дополнительной заявке.

Механически стыкуется с УПЗ 7.2 КОМФОРТ.

Отходы механической обработки локализуются в пределах площади поддона, затем удаляются с помощью АДАПТЕР 3.0 ВМУ или шлангом от используемого УПЗ.

1.4 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35°С
- влажность при 25 °С, не более 80%





1.5 Основные технические характеристики

- масса, не более 7,0 кг
- габариты, без экрана, не более ..680×565×250 мм
- диаметр подсоединяемого шланга 45 мм

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ И УСТРОЙСТВО

- 1 - стенка задняя с пазами и «окнами»
 - 2 - поддон с фильтр-ситом и пластиковой заглушкой
 - 3 - втулка резиновая ВТУЛКА 1.0 ШГВ
 - 4/5 - упор левый/правый
 - 6 - подушка мягкая для подлокотников
 - 7 - экран защитный ЩИТ 1.0 АРТ
 - 8 - полка навесная – 2 шт
 - 9 - подставка для инструментов ПОДСТАВКА 6.1 ТУЛЗ
 - 10 - ДЕРЖАТЕЛЬ 1.0 СТАКАН
 - 11 – опорный уголок
 - 12 – скоба
- Этикетка АВЕ 618.000.000 ЭТ

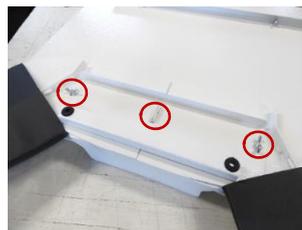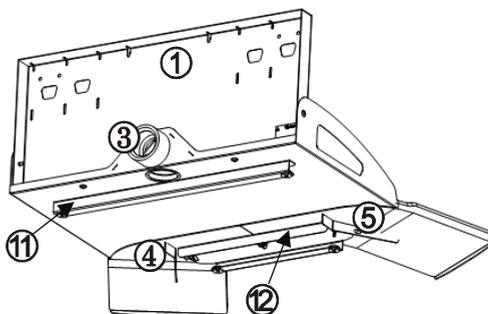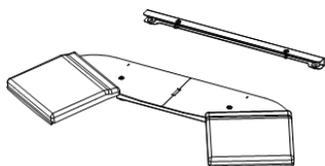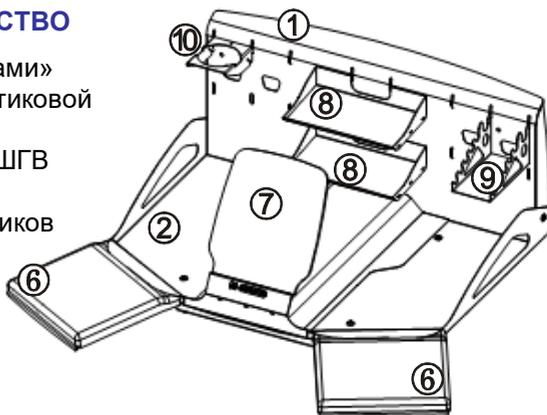

3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установить поддон на ровную устойчивую горизонтальную поверхность стола или на УПЗ 7.х, см. ЭД на УПЗ раздел Дополнительные устройства и принадлежности.

Установить заднюю стенку (1).

Установить экран (7).

Подсоединить шланг от УПЗ к втулке (3) на задней стенке поддона.

Втулка (3) может устанавливаться сзади, выход (А) воздушного канала, или снизу поддона, выход (Б) воздушного канала (закрыт пластиковой заглушкой).



При использовании выхода (Б) – заглушить выход (А): открытым должен оставаться только 1 выход воздушного канала.

Закрепить светильник ЛЮКС 2.1 (поставка по дополнительной заявке) на задней стенке винтами с гайками из комплекта ЛЮКС.

Разместить используемые устройства на поддоне.

Включить УПЗ, используемые устройства и приступить к работе.

По окончании работ отключить используемые устройства, УПЗ.

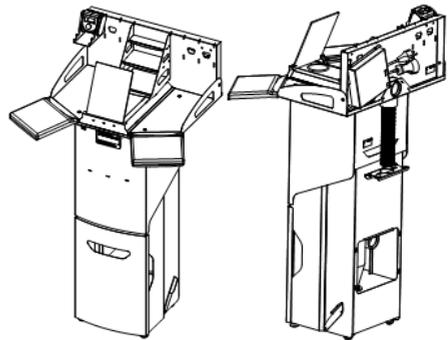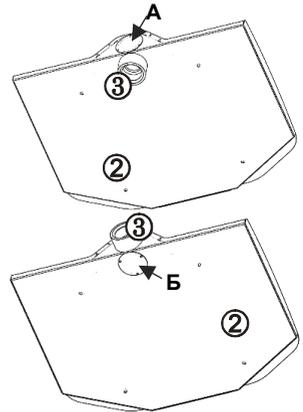

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере необходимости проводятся следующие виды ухода и техобслуживания:

- очистка поддона от производственных отходов при помощи УПЗ;
- протирка поверхностей поддона, защитного экрана от пыли влажной мягкой тканью (губкой).

Материал подушек – искусственная кожа. При необходимости удалить загрязнения влажной мягкой тканью, губкой или гигиенической салфеткой и протереть насухо. Допускается использовать раствор шампуня, мыло.

5 ГАРАНТИИ

5.1 Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Срок службы - не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности.

5.2 Гарантия не распространяется на защитный экран и лакокрасочное покрытие деталей из-за нормального износа при предусмотренном использовании. Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.