



EAC



ТУМБА ПОДКАТНАЯ ТУМБА 1.1 М

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-РУ.КА01.В.25587/20 от 29.04.2020



Этикетка
АВЕ 285.000.001 ЭТ

ПРАЙС АВЕРОН всегда под рукой на мобильном



Приложение ПРАЙС АВЕРОН
для Android на



<https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.averon.averonpricexml1>



Приложение ПРАЙС АВЕРОН
для IOS (iPhone и iPad) на



<https://apps.apple.com/ru/app/прайс-аверон/id1484614177>

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Тумбы подкатной ТУМБА 1.1 М (далее – тумба). ТО 31.09.11-039-52331864-2020.

1.2 Условия эксплуатации

- окружающая температура..... 10-35 °С
- влажность при 25°С, не более80 %

1.3 Основные технические характеристики

- габариты400×540×625 мм
- размер столешницы..... 400×500 мм
- масса, не более..... 20 кг
- максимальная нагрузка на столешницу..... 60 кг

1.4 Особенности, рис.1-3

Оптимальна для размещения электровакуумной печи ЭВП АБЕРОН.

Со столом СЗТ АБЕРОН образует законченное рабочее место зубного техника. Может размещаться под столешницей с установленным модулем выдвижных ящиков КОМПЛЕКТ 2.0.

Полностью металлическое исполнение.

Для перемещения тумбы на роликах (2), установленных сзади, приподнять передний край.

Опоры (3) регулируются по высоте.

Ящики с шариковыми направляющими полного выдвижения.

Нижний ящик (5) – большей вместимости. Верхний ящик (6) – с замком (7). В ящиках и на столешнице размещены износостойкие коврики.

Возможность установки справа и слева бормашины БМ ЭКО ПРОФИ.

Возможность установки ПАНЕЛИ 1.0 ТУМБА (см. ЭД на изделие).

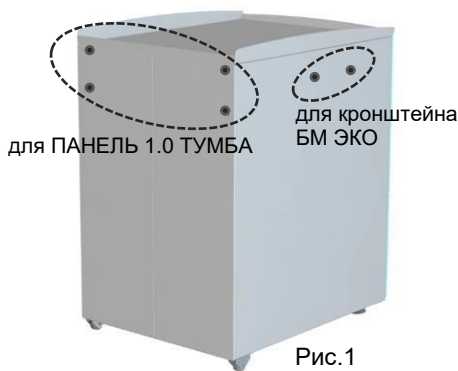


Рис.1
Вид сзади


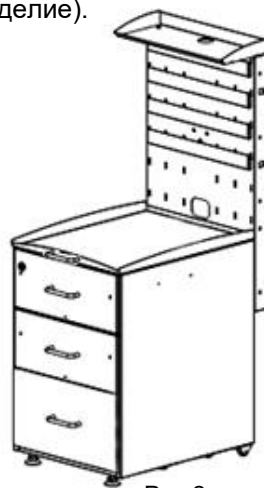


Рис.2

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ, рис.3 шт


Тумба (1) в сборе	– 1
Коврик	– 3
Крепеж установлен по месту	
Этикетка АВЕ 285.000.001 ЭТ	

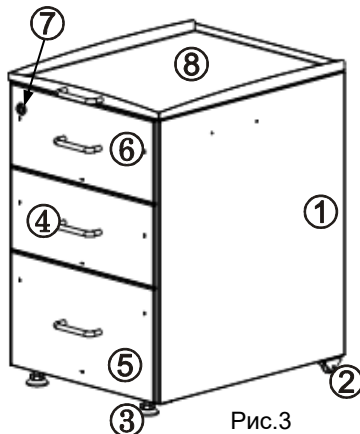

3 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рекомендуется для облегчения и ускорения подготовки использовать электроинструмент (шуруповерт, электроотвертка).

1. Убрать транспортировочные вкладыши (9), рис. 4.
2. Столешницу выровнять горизонтально вращением опор (3).
3. Установить ручки (4) ящиков из транспортного положения в рабочее.

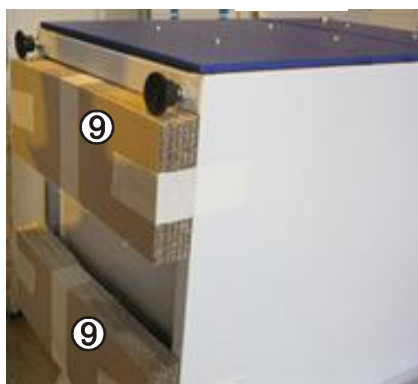

ВНИМАНИЕ!

Максимальная загрузка ящиков – 15 кг.

При движении ящиков по шариковым направляющим может потребоваться дополнительное усилие в начале и конце хода.

4 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3
ООО «ВЕГА-ПРО»

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

www.averon.ru

feedback@averon.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ







Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

ТУМБА 1.1 М	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

КОНТАКТЫ АВЕРОН

	averon.ru		Averon Russia
	8 800 700-12-20 бесплатный по РФ		АВЕРОН - оборудование для зубных техников
	feedback@averon.ru		instagram.com/ averon.ru

Присоединяйтесь к нам в соц. сетях!