



EAC



УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ

ТРИММЕР 1.0 АРТ



Руководство по эксплуатации
АВЕ 681.000.000 РЭ

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-РУ.АЖ22.В.01766 от 16.08.2018



“Внимание! Смотри сопроводительные документы” -
необходимость предварительного изучения Руководства
по эксплуатации, особенно раздела “Меры
безопасности”

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на Устройство для обработки гипсовых моделей серия ТРИММЕР (далее - ТРМ). ТУ 27.90.11-067-52331864-2018.

1.2 ТРМ предназначен для мокрой обработки гипсовых моделей.

1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура10...35°С
- влажность при 25°С, не более80%

1.4 Основные технические характеристики

- электропитание* ~220В 50Гц 3А
- потребляемая мощность, max 550 Вт
- уровень шума, не более 65 дБА
- скорость вращения диска (на холостом ходу) 1500 об/мин
- внешний диаметр диска 250-255 мм
- угол наклона столика 0°, 4°, 8°
- диаметр посадочного отверстия 25 мм
- диаметр входного штуцера для воды 3/4"
- давление водопроводной воды, max 6 атм
- габариты, не более 305×465×325 мм
- масса, не более 17,0 кг

* - вставка плавкая ВП2Б-1В-10А-250В – 2 шт

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Розетка питания ТРМ должна иметь контакт защитного заземления.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать ТРМ без крышки.

Остерегаться прикосновений к вращающимся элементам конструкции.

Вилка сетевого шнура ТРМ должна быть отключенной от розетки при:

- смене предохранителей,
- замене диска.




3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Обозначение	К-во
Устройство для обработки гипсовых моделей	ТРИММЕР 1.0 АРТ	1
Запасные части, принадлежности и инструменты		
Диск карборундовый (установлен)	ДИСК 1.0 КАРБОРУНД	1
Шланг подвода воды		1
Гибкий гофрированный шланг для отвода воды	ШГВ 1.5	1
☒ - Поставка по дополнительной заявке		
☒ - Диск карборундовый	ДИСК 1.0 КАРБОРУНД	
☒ - Диск алмазный	ДИСК 1.0 АЛМАЗ	
Руководство по эксплуатации	АВЕ 681.000.000 РЭ	

4 КОНСТРУКЦИЯ

4.1 Основные конструктивные элементы

- 1 – передняя крышка
- 2 – основание с двигателем
- 3 – кожух
- 4 – плата
- 5 – сетевой выключатель
- 6 – сетевой шнур с вилкой
- 7 – вентиляционная решетка
- 8 – входной штуцер для шланга подвода воды
- 9 – гибкий шланг ШГВ 1.5 (отвод воды)
- 10 – предохранители
- 11 – столик для модели
- 12 – диск карборундовый
- 13 – разбрызгиватель воды
- 14 – вентиль регулирования подачи воды

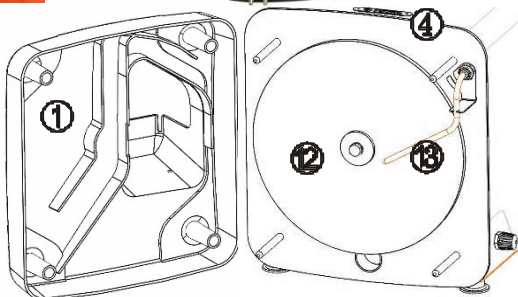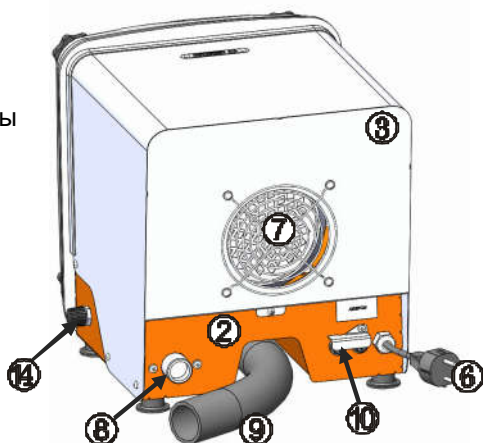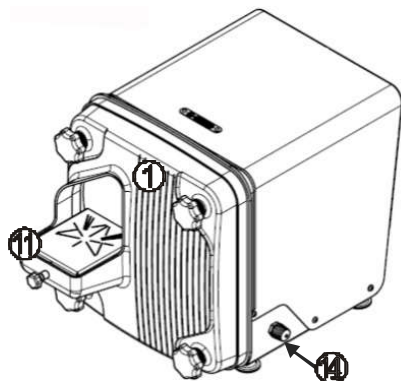

4.2 Устройство

На основании (2) расположен двигатель, закрытый защитным кожухом (3). На вал двигателя установлен карборундовый диск (12). Выключателем (5) включаются/отключаются двигатель и подача воды на диск, вентилем (14) регулируется поток воды.

5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1 Выдержать **ТРМ** при комнатной температуре 4 часа, если находился в холоде.

5.2 Разместить **ТРМ** на ровной, устойчивой горизонтальной поверхности, обеспечив свободный доступ к органам управления, штуцеру подачи и отводу воды.

5.3 Подсоединить шланг из комплекта поставки к входному штуцеру (8) и водопроводу с холодной водой.

5.4 Подсоединить гибкий гофрированный шланг (9) и направить его в раковину.

При монтаже системы отвода воды **НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ** использовать шланги, трубы и иные элементы, не входящие в комплект поставки. Отработанная вода отводится из рабочей камеры самотеком, при монтаже системы отвода - обеспечить ее уклон в сторону слива.

ВНИМАНИЕ!

Возможно вытекание незначительного количества воды через специальное дренажное отверстие в основании **ТРМ** при работе.
Рекомендуется **ТРМ** устанавливать на поддон.

5.5 Подключить вилку сетевого шнура (6) к розетке ~220В 50Гц (см. Меры безопасности).

5.6 Включить **ТРМ** сетевым выключателем (5).

5.7 Вентилем (9) отрегулировать количество воды так, чтобы вода омывала диск (12) без брызг через окно крышки (1).

5.8 Столик для модели (11) может быть установлен в 3-х положениях наклона 0°, 4°, 8°. На столик нанесена разметка под углы 25, 55, 60, 65, 120°.

5.9 По окончании обработки выключить **ТРМ** сетевым выключателем.

5.10 При длительном перерыве и проведении работ по обслуживанию отключить **ТРМ** от сети и воды.

При ухудшении отвода воды (значительное увеличение выброса брызг через окно крышки (1)) снять крышку и очистить сливную магистраль **ТРМ** от гипса, обратная сборка - см. раздел ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование **ТРМ** проводится в таре изготовителя всеми видами крытых транспортных средств по действующим для них правилам. Условия транспортирования: температура от минус 50 до 50°C, относительная влажность до 100% при температуре 25°.

6.2 **ТРМ** должен храниться на закрытых складах в упаковке предприятия-изготовителя, на стеллажах в один ряд при температуре от минус 50 до 40°C и относительной влажности до 98% при температуре 25°C.

Не допускается хранение **ТРМ** совместно с кислотами и щелочами.



7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Установлены следующие виды технического обслуживания, выполняемые персоналом, эксплуатирующим **ТРМ** (до проведения отключить **ТРМ** от сетевой розетки, см. **Меры безопасности**):

1) **послеоперационное**: протирка корпуса **ТРМ** влажной мягкой тканью (губкой).

2) **по мере необходимости (износ)**, предварительно отключив **ТРМ** от сетевой розетки, заменить диск (**12**), для чего открутить 4 ручки (**15**), снять крышку (**1**), ослабить винт (**16**), повернуть разбрызгиватель (**13**) против часовой стрелки, открутить центральный болт и заменить диск. Повернуть разбрызгиватель по часовой стрелке **до упора**, затянуть винт (**16**). Установить крышку (**1**).

Порядок установки ручки (**15**) крышки: уплотнительная шайба - металлическая шайба - ручка.

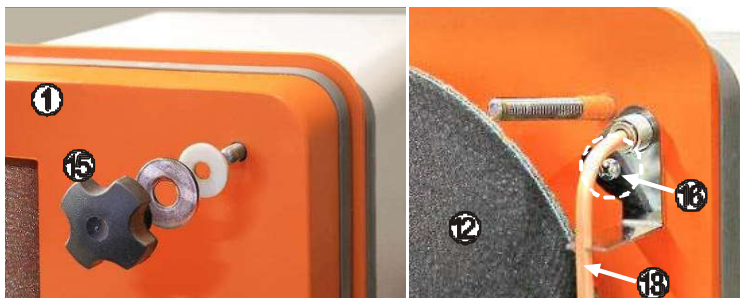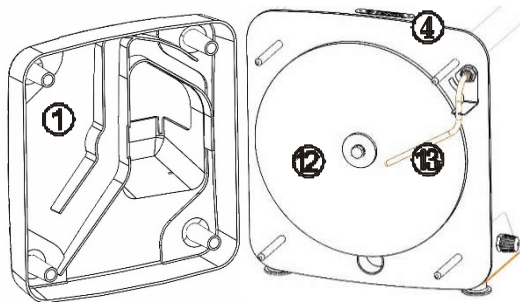

3) после установки нового карборундового диска рекомендуется произвести правку цилиндрической периферийной поверхности при помощи алмазного карандаша, вращая диск (например, шурупвертом) со скоростью 100-200 об/мин.

ВНИМАНИЕ!

При замене карборундового диска на алмазный обязательно сначала установить опорный диск и только на него устанавливать алмазный диск.

4) периодически, 1-2 раза в год, смазать резьбу на шпильках и/или ручках **(15)** любой пластичной смазкой для облегчения снятия и установки крышки **(1)**.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе **ТРМ** не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) **ТРМ** не требуется.

9 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи или, если она не указана - то с даты выпуска предприятием-изготовителем. Гарантия не распространяется на диск карборундовый, шланг подвода воды.

Средний срок службы - 3 года. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности **ТРМ**.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Изготовитель (Представительство) осуществляет бесплатно ремонт или замену продукции в течение гарантийного срока эксплуатации, при выполнении вышеперечисленных требований, по письменной заявке владельца, с предъявлением настоящего документа или копии документа, подтверждающих покупку (чек, платежное поручение) и комплектацию продукции, предоставляемой:

- для замены – согласно покупной комплектации;
- для ремонта – по согласованию с исполнителем, осуществляющим ремонт.

Для замены или ремонта продукция предоставляется в упаковке Изготовителя в ЧИСТОМ виде. Устранение повреждений, полученных при доставке, и работы по приведению в надлежащий вид осуществляются за счет владельца оборудования.

Гарантийный и постгарантийный ремонт в первую очередь осуществляется Поставщиком или в ближайших сервисных представительствах АВЕРОН. Доставка оборудования для ремонта производится владельцем за свой счет.

Перечень авторизованных сервисных центров приведен на сайте АВЕРОН: <https://www.averon.ru/service/>.

Адрес Изготовителя:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3

ООО «ВЕГА-ПРО»

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

www.averon.ru

feedback@averon.ru

Мобильное Приложение АВЕРОН:


для Android



для IOS



для Huawei

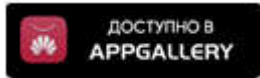

научно-производственный комплекс

Учебный центр АВЕРОН

приглашает на обучение
зубных техников, врачей,
руководителей и администраторов
стоматологических учреждений

Программа на
<http://www.averon.ru/study/>



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

ТРИММЕР 1.0 АРТ

Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

КОНТАКТЫ АВЕРОН



averon.ru



Averon Russia



8 800 700-12-20
бесплатный по РФ



АВЕРОН -
оборудование
для зубных
техников



feedback@averon.ru



instagram.com/
averon.ru

Присоединяйтесь к нам в соц. сетях!