




EAC



## РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ серии БРМ

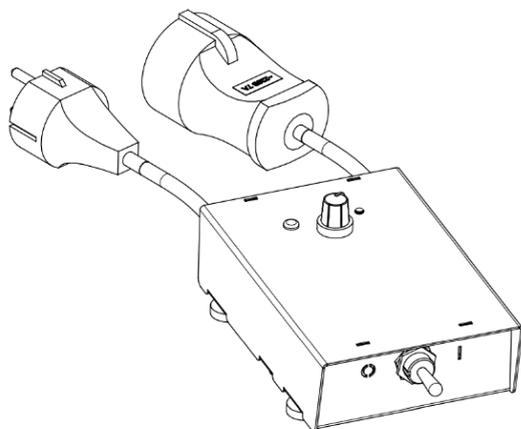

Этикетка  
АВЕ 048.000.000.ЭТ

Декларация о соответствии  
ЕАЭС N RU Д-РУ.МБ32.В.13718 от 13.06.2018

### Мобильное Приложение АВЕРОН:

для Android



для IOS



для Huawei



## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

**1.1 Регулятор мощности БРМ 1.0 НЬЮ** (далее – БРМ) предназначен для регулирования мощности всасывания вытяжного устройства (далее – УПЗ) и сбережения его ресурса. ТУ 4341-030-52331864-2018. ТН ВЭД ЕАЭС 9032102000. Рекомендуется использовать с Устройствами пылевсасывающими зуботехническими УПЗ-Бокс-01 «Аверон».

### 1.2 Условия эксплуатации

окружающая температура ..... 10...35°C

влажность при 25°C, не более ..... 80%

### 1.3 Основные технические характеристики

максимальная регулируемая мощность ..... 1400 Вт

электропитание ..... ~220В\* 50Гц 8А

габариты, ..... 90×150×60 мм

\* - отклонение напряжения питания от номинального значения ±10%

### 1.4 Комплектность

БРМ

Этикетка АВЕ 048.000.000 ЭТ

## 2 УСТРОЙСТВО (рис. 1-2)



1 – корпус

2 – ручка регулятора мощности всасывания

3 – сетевой тумблер

4 – розетка для подключения вытяжного устройства

5 – вилка с сетевым шнуром

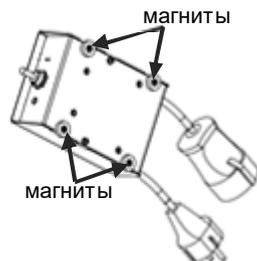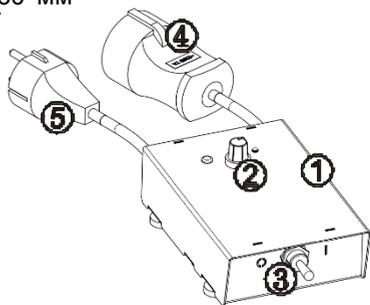

## 3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Разместить БРМ, обеспечив свободный доступ и удобное управление им:

- на горизонтальной поверхности;

- на вертикальной металлической (ферромагнитной) поверхности. БРМ фиксируется магнитами. Рабочее положение – проводами вниз.

Включить вилку сетевого шнура вытяжки в розетку (4), а вилку (5) – в сетевую розетку ~220В 50Гц.

Включение/выключение вытяжки осуществляется сетевым тумблером (3).

Установка требуемой мощности – ручкой (2).

При использовании вытяжки совместно с фильтром-циклоном АФЦ для эффективного улавливания пыли ЦИКЛОНОМ устанавливать ручкой БРМ не менее 1/3 диапазона регулирования.

По окончании работы вынуть вилку (5) из сетевой розетки ~220В 50Гц.

#### **4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Очистку поверхности БРМ производить тампоном, отжатым после слабого мыльного раствора. По окончании очистки - протереть сухой мягкой тканью.

#### **5 УТИЛИЗАЦИЯ**

В составе БРМ не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) БРМ не требуется.

#### **6 ГАРАНТИИ**

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Средний срок службы – 5 лет.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

#### **Изготовитель:**

**620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3**

**ООО «ВЕГА-ПРО»**

**бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20**

**тел. (343) 311-11-21**

**Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23**

**бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02**

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

---

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

<b>БРМ</b>	<b>1.0 НЬЮ</b>
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

## КОНТАКТЫ АВЕРОН



averon.ru



Averon Russia



8 800 700-12-20  
бесплатный по РФ



АВЕРОН -  
оборудование  
для зубных  
техников



feedback@averon.ru



instagram.com/  
averon.ru

Присоединяйтесь к нам в соц. сетях!